

Mix2Vial™:










- Let at anvende
- Blå adapter til vandet
- Integreret filter i overføringssettet
- Muliggør sikker og hygiejnisk teknik

Sådan
anvendes



Mix2Vial™ is a trademark of West Pharmaceutical Services, Inc. or a subsidiary thereof.

Mix2Vial™: Brugsanvisning

Illustrationer	Vejledning i brug: Anvend aseptiske forhold.	Illustrationer	Vejledning i brug: Anvend aseptiske forhold.
	<p>1. Fjern flipoff-plomberingen fra hætteglassene med pulver og vand. Tør propperne af med en aseptisk opløsning og lad dem tørre. Åbn Mix2Vial™-pakken ved at trække forseglingen af. Fjern ikke Mix2Vial™ fra blisterpakningen.</p>		<p>6. Roter forsigtigt hætteglasset med pulver indtil pulveret er helt opløst. Hætteglasset må ikke rystes.</p>
	<p>2. Anbring hætteglasset med vand på en plan, ren overflade og hold fast i hætteglasset. Tag blisterpakningen med Mix2Vial™-sættet og tryk spidsen på den blå adapterdel lige ned gennem hætteglassets prop.</p>		<p>7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Monter sprøjten på Mix2Vial™ luer lock-tilkobling, mens hætteglasset med pulver stadig er stående. Sprøjt luft ind i hætteglasset.</p>
	<p>3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial™-sættet ved at tage fat i kanten ovenfra og trække den lige op. Sørg for kun at fjerne emballagen, ikke selve Mix2Vial™-sættet.</p>		<p>8. Hold stemplet i bund og vend op og ned på hætteglasset (sammen med sæt og sprøjte). Træk opløsningen ind i sprøjten ved langsomt at trække stemplet tilbage.</p>
	<p>4. Stil hætteglasset med pulver på et plant fast underlag. Vend hætteglasset med vand med Mix2Vial™-sættet monteret og tryk spidsen på den gennemsigtige adapterdel lige ned gennem proppen på hætteglasset med pulver. Vandet løber automatisk over i hætteglasset med pulver.</p>		<p>9. Kontroller, at al opløsning er overført til sprøjten. Tag godt fat i sprøjten (hold sprøjten med stemplet nedad) og afmonter den gennemsigtige Mix2Vial™-adapter fra sprøjten.</p>
	<p>5. Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial™-sættet, hvor hætteglasset med pulver er monteret, og med den anden hånd fat i den del af Mix2Vial™-sættet, hvor hætteglasset med vand er monteret, og skru forsigtigt sættet fra hinanden i 2 dele for at undgå dannelse af skum. Kasser hætteglasset med vand med den blå Mix2Vial™-del monteret.</p>		